



# Структур 2 СЦ/ Структур 2 КМ (Structur 2 SC/ Structur 2 QM)

## Інструкція із застосування



**Структур 2 СЦ / Структур 2 КМ** – це система паста–паста холодної полімеризації для виготовлення тимчасових коронок, мостоподібних конструкцій, вкладок і накладок. **Структур 2 СЦ/ Структур 2 КМ** складається з базисної та каталізаторної паст. **Структур 2 СЦ** випускається 7 кольорів: А1, А2, А3, В1, В3, С2 та ВL. **Структур 2 КМ** постачається в кольоровій гамі А1, А2 та А3.

### Застосування:

#### Структур 2 СЦ в картриджах:

Помістити картриджі із **Структур 2 СЦ** у пістолет для змішування **VOCO (тип 2)** або у відповідний інший. Перед першим застосуванням можуть виявлятися технічно зумовлені незначні відмінності у наповненні обидвох камер картриджів. Зняти ковпачок і витискати матеріал до тих пір, поки з обох отворів не виходитиме однакова кількість матеріалу. Надіти канюлю для змішування тип 6 і зафіксувати її поворотом на 90°, натисканням на спуск витиснути матеріал, який при цьому змішується у правильній пропорції. Після використання канюлю залишити на картриджі. Перед наступним застосуванням замінити на нову канюлю. Під час зміни канюлі перевірити отвори картриджів на вільне надходження матеріалу.

#### Структур 2 КМ у шприцах Квік Мікс:

Зняти захисну капу зі шприца поворотом проти годинникової стрілки. Встановити канюлю для змішування тип 10. Пази шприца і канюлі для змішування повинні співпадати. Зафіксувати канюлю поворотом на 90° за годинниковою стрілкою. При витисканні матеріал автоматично змішується у канюлі в правильній пропорції і його можна безпосередньо аплікувати.

### Вказівки з обробки:

Згладити наявні нерівності відпрепарованої кукси, не використовуючи при цьому еugenolвмісні цементи. У разі, якщо не будуть використовуватися попередньо виготовлені зубні ковпачки або ін., зняти відбиток. Відбиток підготувати шляхом вирівнювання нерівностей і вирізання канавок для стоків. При очікуваній незначній товщині стінок тимчасової реставрації відбиток розширити, усуваючи зокрема перегородки в міжзубних проміжках. На завершення відбиток очистити і висушити повітрям.

**Структур 2 СЦ/ Структур 2 КМ** аплікувати безпосередньо у відбиток. Не наповнювати з надлишком.

**Структур 2 СЦ/ Структур 2 КМ** приблизно через 1-1,5 хв після початку змішування (через 0,5-1 хв після внесення у порожнину рота) набуває еластичної консистенції.

Тимчасову реставрацію можна вилучати з порожнини рота через 1,5 хв, однак відсутність проблем при вилученні можлива тільки в еластичній фазі.

Надлишки матеріалу є засобом додаткового контролю за процесом зв'язування. Час зв'язування матеріалу, що залишився в канюлі, не порівнюється з часом зв'язування у порожнині рота.

При температурі у приміщенні 23°C і вологості повітря 50% тривалість етапів обробки наступна:

| Час                          | Хронометраж   |
|------------------------------|---------------|
| Внесення у порожнину рота    | <b>30 с</b>   |
| Зв'язування у порожнині рота | <b>1 хв</b>   |
| Вилучення                    | <b>1,5 хв</b> |
| Повне зв'язування (3 хв)     | <b>4,5 хв</b> |
| Подальша обробка             |               |



50 штук, тип 6

Арт. № 2185

### **Структур 2 КМ**

Упаковка **шприци Квік Мікс** 8 г, канюлі для змішування

тип 10

Арт. № 1309    А1            Арт. № 1311    А3  
Арт. № 1310    А2

Канюлі для змішування **Структур 2 КМ**

50 штук, тип 10

Арт. № 2189

Наші препарати розроблені для застосування у стоматології. Усні та/або письмові вказівки, а також наші поради, засновані на докладному вивченні матеріалу, не зобов'язують Вас відмовитися від використання матеріалів, що випускаються нами, відповідно до Вашої спеціальності і на Ваш розсуд. Однак застосування наших матеріалів без нашого контролю знаходиться виключно у сфері Вашої власної відповідальності. Звичайно ми гарантуємо відповідність якості наших матеріалів чинним нормам, доставку та умови торгівлі - прийнятим стандартам.



**VOCO GmbH**

ВОКО гмбХ

27472 Антон-Флеттнер-ст.

1-3, Куксхафен, Німеччина  
27472, Anton-Flettner-Str. 1-3,  
Cuxhaven, Germany

**Уповноважений представник в Україні:**

ФОП Литвиненко Мирослав Миколайович

02141 м. Київ, Україна,

вул. Мишуги ¼, кв. 19  
m.litvinenko@voco.com  
+380503311092



UA.TR.120