



Біфлуорид 10

(Bifluorid 10)

Фторидовмісний лак для лікування гіперчутливості зубів

Інструкція із застосування



Біфлуорид 10 – це швидкосохнуча стоматологічна суспензія з хорошою адгезією до сухої емалі і дентину. Завдяки цьому забезпечується належна герметичність дентинних каналців на тривалий термін.

Біфлуорид 10 утворює водостійку ізолюючу плівку, що захищає від термічних і хімічних впливів.

Показання до застосування:

Лікування всіх видів чутливості (гіперсенсibiliзація дентину), напр.:

- оголені шийки зубів та краї коронок
- після професіональної чистки зубів та усунення зубного каменю
- після препарування і пришлифовування поверхні зуба
- при стертих жувальних поверхнях і наявних кламерах
- після уражень зубної емалі (злами, сколювання)
- герметизація країв порожнин після встановлення пломби, зокрема після застосування техніки протравлювання
- як захист дентину/прокладки під амальгамні пломби

Застосування:

1. Підготовка

Поверхні, що підлягають лікуванню, очистити та ретельно просушити повітрям.

2. Забір

а) флакон

Перед кожним використанням **Біфлуорид 10** струшувати. Тверді частинки повинні рівномірно розподілятися у суспензії. Достатній об'єм флакона і дві металеві кульки полегшують струшування.

Нанести **Біфлуорид 10** покравельно на аплікатор, а краще на поролонові тампони **Пеле Тім**. Флакони з **Біфлуорид 10** після застосування знову щільно закрити.

б) Унідоза

Відокремити **Унідозу** по лінії перфорації і повернути вгору стороною з надрукованим текстом. За допомогою **Мікро Тім** проткнути фольгу, розширити отвір і круговим рухом зволожити пензлик рідиною.

3. Аплікація

Поверхню покрити тонким шаром. Увага! Надто товстий шар легко знімається.

Залишити фторлак всякати протягом 10 - 20 с і просушити повітрям. При правильному нанесенні і регулярній гігієні порожнини рота (не чистити зуби протягом 12 - 24 годин після нанесення) **Біфлуорид 10** залишається на покритих поверхнях декілька днів.

За наявності гіперчутливих шийок зубів, країв коронок або аналогічних показань процедуру повторити двічі-тричі з інтервалом 7 днів. При цьому поверхню тільки просушити і знову покрити шаром.

Вказівки/запобіжні заходи:

Біфлуорид 10 містить етилацетат, фторид натрію, фторид кальцію, складні ефіри целюлози і евгенол. За наявності підвищеної чутливості (алергії) до вказаних компонентів **Біфлуорид 10** слід відмовитися від його застосування.

1 г препарату **Біфлуорид 10** містить:

50 мг фториду натрію (відповідає 23 мг фториду) і 50 мг фториду кальцію (відповідає 24 мг фториду). Для осіб, у яких відсутній контроль ковтального рефлексу (діти дошкільного віку, особи з інвалідністю), застосовувати **Біфлуорид 10** з особливою обережністю.

Після нанесення препарату **Біфлуорид 10** призупинити на кілька днів систематичний додатковий прийом фторидів (таблетки фториду або фторована харчова сіль).

При неправильному застосуванні (див. Розділ «Застосування») в порожнині рота може утворитися надлишок фторидів. Проковтування їх великої кількості може викликати нудоту, блювоту, пронос. Регулярне перевищення щоденної норми застосування фториду (системно і місцево) понад 2 мг у період розвитку зубів може призвести до порушення мінералізації зубної емалі. Це порушення, що визначається як дентальний флюороз, характеризується появою плям на зубній емалі.

Біфлуорид 10 повинен бути рідкотекучим, так щоби після струшування матеріал вільно витікав з кришки-крапельниці. У разі необхідності розвести його декількома краплями призначеного для цього розчинника. Розчинник використовувати для очищення інструментів тощо.

Зберігання:

Зберігати **Біфлуорид 10** у захищеному від дії прямих сонячних променів місці при температурі 4°C-23°C. Після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці або флаконі, препарат більше не застосовувати.

Наші препарати розроблені для використання в стоматології. Оскільки мова йде про застосування препаратів, що постачаються нами, наші усні та / або письмові вказівки, а також наша консультація, є абсолютно чесними і ні до чого не зобов'язують. Наші вказівки і / або консультації не звільняють Вас від перевірки препаратів, що постачаються нами, на їх придатність до використання у відповідних цілях. Оскільки застосування наших препаратів проводиться без нашого контролю, відповідальність за це лягає виключно на Вас. Зрозуміло, ми гарантуємо, що якість наших препаратів відповідає чинним нормам, а також стандартам, зазначеними в наших загальних умовах продажу і поставок.



Воко ГмбХ

27472 Антон-
Флеттнер-ст. 1-3,
Куксхафен, Німеччина

Voco GmbH

27472, Anton-Flettner-Str. 1-3,
Cuxhaven, Germany

Уповноважений представник в Україні:

ФОП Литвиненко Мирослав Миколайович
02141 м. Київ, Україна,
вул. Мишуги ¼, кв. 19
voco@i.com.ua
+380503311092



UA.TR.120